

DayClocks

Benutzerhandbuch



DayClocks

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf Ihrer DayClock! In diesem Benutzerhandbuch wird die Verwendung folgender Produkte erläutert:

- DayClock mit DayClock-Abonnement
- DayClock ohne DayClock-Abonnement

Siehe Kapitel 2 Produktbeschreibung für weitere Informationen über das DayClock-Abonnement.

Dieses Benutzerhandbuch beschränkt sich auf die Erläuterung der Grundfunktionen der DayClock und darauf, wie Sie Aktivitäten erstellen können. Es werden nicht alle Funktionen in diesem Benutzerhandbuch aufgeführt. Sie können beispielsweise auch Fotos an die DayClock senden. Bitte besuchen Sie unsere Website, um weitere Informationen über diese Funktionen zu erhalten: www.dayclocks.eu

Dieses Benutzerhandbuch richtet sich an die Benutzer der DayClock. Unter Benutzer wird der Betreuer und/oder die Familie des Hilfebedürftigen verstanden, der bzw. die die DayClock verwaltet.

Verwenden Sie das Inhaltsverzeichnis, um durch das Benutzerhandbuch zu navigieren.

Für weitere Informationen oder die Bestellung eines Benutzerhandbuchs und/oder eines DayClock-Abonnements wenden Sie sich bitte an:

DayClocks International B.V.

Kanaalweg 33-35
2903 LR Capelle a/d IJssel
www.dayclocks.eu
info@dayclocks.nl

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen über die Verwendung der DayClock wünschen, besuchen Sie bitte unsere Website: www.dayclocks.eu/faq

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4
1.1	Sachgemäße und unsachgemäße Verwendung	4
1.2	Symbole in diesem Benutzerhandbuch	4
2	Produktbeschreibung	5
2.1	Allgemeines	5
3	Vorbereitung für die Verwendung	6
3.1	Auspacken	6
3.2	Anschließen	6
4	Inbetriebnahme	7
4.1	Die DayClock das erste Mal verwenden	7
4.2	Eine Aktivität planen (nur für Abonnenten)	11
5	Einstellungen der DayClock ändern	13
5.1	Die Anzeige der Uhr einstellen	14
5.2	Die Farben der Uhr einstellen	15
5.3	Die Option Nachruhe aktivieren bzw. deaktivieren	16
5.4	Tagesabschnitte ändern	18
6	Garantie	19
7	Haftungsausschluss	19

1 Einführung

1.1 Sachgemäße und unsachgemäße Verwendung

Die DayClock wurde entwickelt, um das Zeitbewusstsein von Hilfsbedürftigen zu schärfen, ihnen eine bessere Übersicht über die geplanten Aktivitäten zu geben und ihnen bei der zeitlichen Orientierung (Tag, Uhrzeit) zu helfen. Das DayClock-Abonnement dient zur Vereinbarung von Terminen, die in der DayClock angezeigt werden. So werden Hilfsbedürftige an Aktivitäten erinnert, die zu bestimmten Zeiten stattfinden müssen.

Die DayClock kann an verschiedene Zusatzgeräte angeschlossen werden, z. B. an Lautsprecher. Auf der Website können Sie sehen, welche Zusatzgeräte für einen Anschluss der DayClock geeignet sind.

**Achtung**

Setzen Sie die DayClock niemals auf Werkseinstellungen zurück! Anderenfalls wird das DayClock-Softwareprogramm gelöscht.

1.2 Symbole in diesem Benutzerhandbuch

**Warnung**

Ein Warnhinweis bedeutet, dass Verletzungen möglich sind, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

**Achtung**

Achtung bedeutet, dass Schäden am Gerät entstehen können.

**Tipp**

Ein Tipp enthält zusätzliche Informationen, z. B. über ein Verfahren.

2 Produktbeschreibung

2.1 Allgemeines

Die DayClock ist ein Plug-&-Play-Tablet und kann sowohl mit als auch ohne DayClock-Abonnement bedient werden. Zur DayClock gehört ein Abonnement. Zur Nutzung der im Abonnement verfügbaren Funktionen erhalten Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort. Beides wird an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse gesandt. Mit dem Abonnement können Sie alle Funktionen für den Fernzugriff auf Ihre DayClock (per Smartphone, Tablet oder PC/Laptop) uneingeschränkt nutzen. So können Sie beispielsweise Termine oder Fotos in der DayClock speichern. Zur Nutzung des Abonnements ist eine WLAN-Verbindung erforderlich. Die DayClock kann nur über die DayClock-App und über die DayClock-Website bedient werden.

Nach 6 Monaten können Sie das Abonnement verlängern. Sie erhalten am Ende der Abo-Laufzeit eine E-Mail mit einem Zahlungslink von DayClocks, über den Sie das Abonnement erneuern können.

Die DayClock (ohne Abonnement) bietet die folgenden Uhrfunktionen:

- Anzeige der Uhrzeit
- Anzeige des Tagesabschnitts
- Anzeige des Wochentags
- Anzeige des Monats
- Anzeige des Jahres

Die DayClock (mit Abonnement) bietet die folgenden Funktionen:

- Aktivitäten erstellen, verwalten und anzeigen – sowohl über die DayClock-App als auch über die DayClock-Website.
- Fotos an die DayClock senden und auf der DayClock ansehen. Sie können Fotos über die DayClock-App und die DayClock-Website senden.
- Die neuen Funktionen finden Sie unter www.dayclocks.eu.

3 Vorbereitung für die Verwendung

3.1 Auspacken

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
2. Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Im Lieferumfang enthalten sind:
 - eine DayClock
 - ein Netzteil
 - ein Micro-USB-Kabel
 - ein Satz Stützen
 - ein Dokument mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort (nur für Abonnenten)



Tipp

Bitte senden Sie eine E-Mail an info@dayclocks.nl, wenn ein Teil fehlen sollte.

3.2 Anschließen

Schließen Sie das Tablet mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter und Micro-USB-Kabel an.



Tipp

Wir empfehlen Ihnen, die DayClock stets am Netzteil angeschlossen zu lassen. Wenn Sie die DayClock vom Netzteil trennen, beachten Sie bitte die Akkulaufzeit von drei Stunden.

4 Inbetriebnahme

4.1 Die DayClock das erste Mal verwenden

Sie können die DayClock sofort in Betrieb nehmen! Das Datum und die Uhrzeit sind bereits eingestellt.

1. Halten Sie die kleine Ein-/Aus-Taste ca. fünf Sekunden gedrückt. Ein Android-Logo wird angezeigt. Die DayClock wird jetzt hochgefahren. Sie werden automatisch zum DayClock-Hauptbildschirm geleitet.



Abbildung 1: Hauptbildschirm

Um den Einstellungsbildschirm aufzurufen (Bildschirm „Allgemeines“), führen Sie bitte folgende Schritte aus:

2. Wischen Sie langsam waagerecht (ca. 5 Sekunden) über den Bildschirm, bis das nächste Menü angezeigt wird.

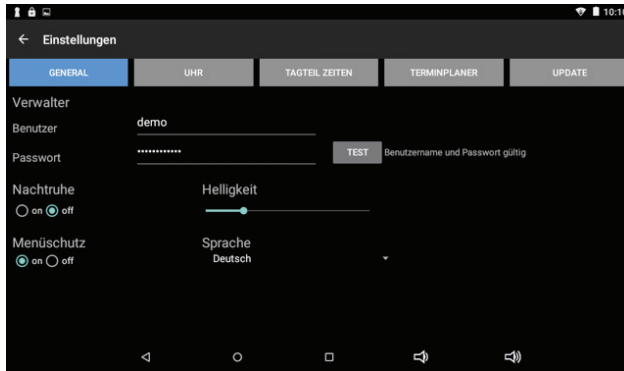


Abbildung 2: Bildschirm „Allgemeines“

Der Bildschirm „Allgemeines“ besteht aus vier Hauptmenüs:

- Allgemeines
 - Uhr
 - Tagesabschnitt Uhrzeiten
 - Terminkalender (nur für Abonnenten)
3. Wenn Ihr Bildschirm geschützt ist, müssen Sie Ihren PIN-Code eingeben. Der PIN-Code lautet standardmäßig **9876**.

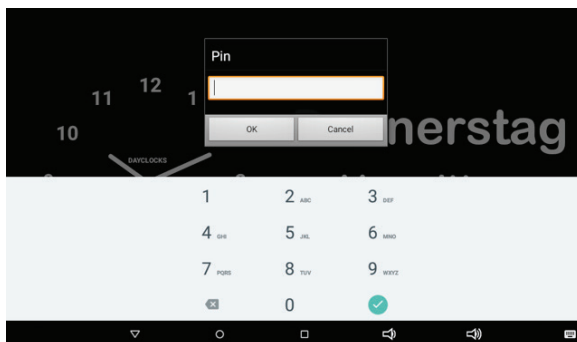


Abbildung 3: Bildschirm „Anmeldebildschirm DayClock“

4. Klicken Sie auf **Allgemeines**, und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

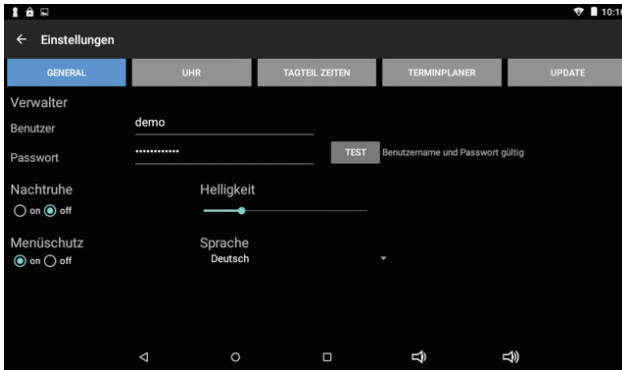




Abbildung 4: Bildschirm „Allgemeines“

5. Klicken Sie auf \triangleleft , um Ihre Auswahl zu bestätigen.
6. Ziehen Sie das Akkusymbol  von oben nach unten.
7. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol , und stellen Sie eine Internetverbindung her.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Test**, um zu prüfen, ob der Benutzername und das Kennwort korrekt eingegeben wurden. Wenn die Benutzerdaten korrekt eingegeben wurden, wird die Meldung „gültig“ angezeigt.



Tipp

Sollte die Meldung „ungültig“ angezeigt werden, haben Sie entweder den Benutzernamen oder das Kennwort nicht korrekt eingegeben oder es besteht keine Internetverbindung.



Aktivität ändern

Aktivität *

Es ist die höchste Zeit zum aufstehen _____

Galerie



Anfang Ende

07:30  03-11-2017 08:00  03-11-2017


Wiederholung

Sprache Signalton

Intervall (Sekunden) * Wiederholungen *


30  3 

Aktivität Farbe



Bild

Ziehen Sie Ihr Bild hierhin (max. 2 MB)



Beispiel

Es ist die höchste Zeit zum aufstehen

Abbildung 5: Neue Aktivität

4.2 Eine Aktivität planen (nur für Abonnenten)

Sie können eine Aktivität über die DayClock-App oder über die DayClock-Website planen. Dazu müssen Sie im Besitz einer DayClock mit einem DayClock-Abonnement sein.

1. Rufen Sie www.dayclocks.eu auf, oder installieren Sie die DayClock-App über Google PlayStore oder Apple App Store.



Tipp

Für Android ist die Version 4.4 oder höher erforderlich.

Für iOS ist die Version 8.0 oder höher erforderlich.

2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
3. Wählen Sie unter Terminkalender die Option **Neu** aus. Der Bildschirm **Neue Aktivität** wird angezeigt.
4. Geben Sie unter „Aktivität“ Ihren Text ein. Bei längeren Texten findet ein automatischer Zeilenumbruch statt. Die Aktivität mit Hintergrundfarbe wird bereits im Beispiel unten angezeigt.
5. Geben Sie unter **Start** die Startzeit der Aktivität ein, und wählen Sie im Kalender das Startdatum aus.
6. Geben Sie unter **Ende** die Endzeit der Aktivität ein, und wählen Sie im Kalender das Enddatum aus.
7. Wählen Sie eine **Aktivitätenfarbe** für den Hintergrund der Aktivität aus.

8. Ziehen Sie ggf. ein Bild zum Rahmen, und lassen Sie los. Das Bild wird neben dem Rahmen angezeigt.



Tipp

Sie können über das iPad keine Bilder hochladen.



Tipp

Sie können Bilder nur in den folgenden Dateiformaten hochladen: jpg, jpeg oder png.

9. Klicken Sie auf **BEWAREN**. Es kann maximal eine Minute dauern, bis die Aktivität angezeigt wird. Die Aktivitäten werden am eingegeben Datum und Uhrzeit angezeigt.



Tipp

Die Aktivitäten dürfen sich überschneiden.

5 Einstellungen der DayClock ändern



Achtung

Setzen Sie die DayClock niemals auf Werkseinstellungen zurück! Anderenfalls wird das DayClock-Softwareprogramm gelöscht.

Sie können die Einstellungen der Uhr nur an der DayClock ändern. Um die Einstellungen der DayClock zu ändern, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1. Wischen Sie waagrecht über den Bildschirm, bis das folgende Menü angezeigt wird.
2. Geben Sie den PIN-Code ein, und klicken Sie auf **OK**. Daraufhin wird der Einstellungsbildschirm der DayClock angezeigt.




Tipp

Der PIN-Code lautet standardmäßig „9876“.

3. Sie können die folgenden Einstellungen ändern bzw. vornehmen:
 - Anzeige der Uhrzeit, siehe „5.1 Die Anzeige der Uhr einstellen“
 - Die Farben der Uhr, siehe „5.2 Die Farben der Uhr einstellen“
 - Die Option Nachtruhe, siehe „5.3 Die Option Nachtruhe aktivieren bzw. deaktivieren“
 - Tagesabschnitte, siehe „5.4 Tagesabschnitte ändern“
 - Klangoption, siehe www.dayclocks.eu
 - Sprachoption, siehe www.dayclocks.eu
 - Alle Aktivitäten entfernen (nur in Kombination mit dem DayClock-Abonnement), siehe www.dayclocks.eu
 - Die Synchronisierung der DayClock-Zeit mit der Internetzeit

5.1 Die Anzeige der Uhr einstellen

Um die Anzeige der Uhr einzustellen, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf das Symbol „Einstellungen“ . Daraufhin wird das Einstellungsmenü angezeigt.
2. Klicken Sie auf „Uhr“. Daraufhin wird das Einstellungsmenü angezeigt.

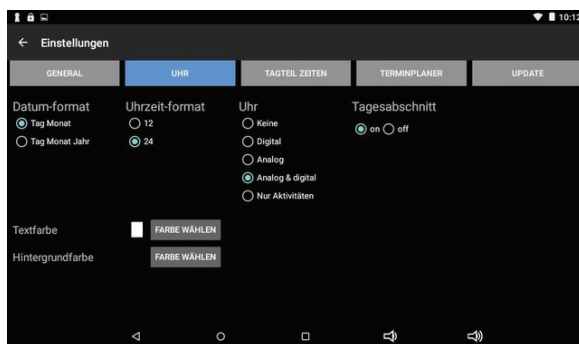


Abbildung 6: Bildschirm „Uhr“

3. Sie können aus den folgenden Anzeigearten auswählen: keine, digital, analog, analog und digital und nur Aktivitäten.




Tipp

Die Anzeige von „nur Aktivitäten“ ist nur für DayClock-Abonnenten verfügbar.

4. Klicken Sie auf , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

5.2 Die Farben der Uhr einstellen

Um die Farben der Uhr einzustellen, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf das Symbol „Einstellungen“ . Daraufhin wird das Einstellungsmenü angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Uhr**. Daraufhin wird das Einstellungsmenü angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Farbe auswählen**, um die Textfarbe einzustellen. Verwenden Sie die runde und lineare Farbskala, um eine Farbe auszuwählen. Standardmäßig ist die Textfarbe Schwarz (FFFFFF) eingestellt.
4. Klicken Sie auf **Farbe auswählen**, um die Hintergrundfarbe einzustellen. Verwenden Sie die runde und lineare Farbskala, um eine Farbe auszuwählen. Standardmäßig ist die Hintergrundfarbe Weiß (000000) eingestellt.

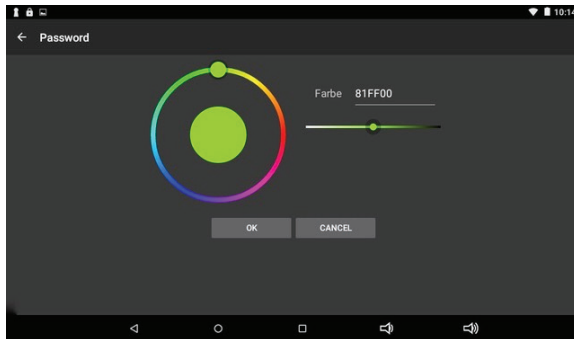


Abbildung 7: Bildschirm „Die Farben der Uhr einstellen“

5. Klicken Sie auf \langle , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

5.3 Die Option Nachtruhe aktivieren bzw. deaktivieren


Die Option Nachtruhe ist vergleichbar mit dem Standby-Modus. Die DayClock wird zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Standby-Modus geschaltet. Der Bildschirm schaltet sich aus und wird schwarz.



Tipp

Die Synchronisierungsfunktion bleibt aktiviert. Die DayClock erhält über die DayClock-App und die DayClock-Website weiterhin Informationen (nur für Abonnenten).

Um die Option **Nachtruhe** zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf das Symbol „Einstellungen“ . Daraufhin wird das Einstellungsmenü angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Allgemeines**. Daraufhin wird das Einstellungsmenü angezeigt.

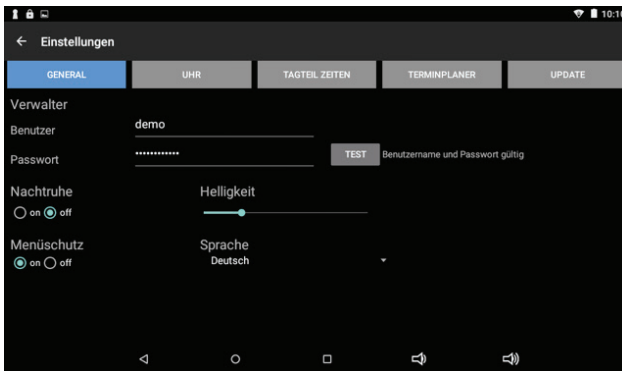


Abbildung 8: Bildschirm „Allgemeines“

3. Klicken Sie auf **ein** oder **aus**, um die Option Nachruhe zu aktivieren bzw. deaktivieren.
 4. Klicken Sie auf , um Ihre Auswahl zu bestätigen.
-


**Tipp**

Bitte beachten Sie, dass die Nachruhephase auf den Zeitraum zwischen 23:00 und 7:00 Uhr eingestellt ist.

5.4 Tagesabschnitte ändern

Sie können die Uhrzeiten der Tagesabschnitte ändern. Sie können jedoch keine Tagesabschnitte hinzufügen oder entfernen.

Um die Uhrzeiten der Tagesabschnitte zu ändern, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf das Symbol „Einstellungen“ . Daraufhin wird das Einstellungsmenü angezeigt.

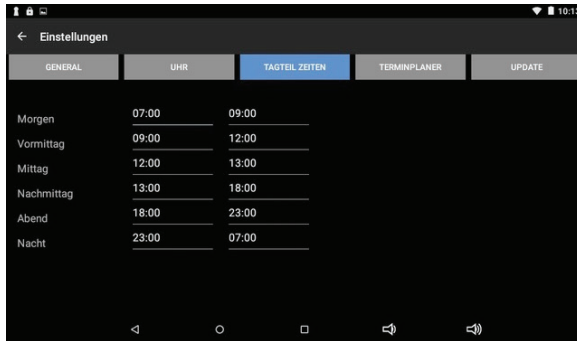



Abbildung 9: Bildschirm „Tagesabschnitt Uhrzeiten“

2. Klicken Sie auf eine Uhrzeit, um diese zu ändern.
3. Klicken Sie auf , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Tipp



- Verwenden Sie wie in der Abbildung Doppelpunkte zwischen den Stunden und Minuten.
 - Stellen Sie sicher, dass die Tagesabschnitte nahtlos aneinander anschließen.
-

6 Garantie

6.1 DayClocks hält sich an alle geltenden gesetzlichen Garantieverpflichtungen.

6.2 Der Kunde kann nur dann Garantieansprüche bei DayClocks geltend machen, wenn das Produkt bei DayClocks oder einem anerkannten DayClocks-Händler gekauft wurde.

6.3 Der Garantiezeitraum beginnt ab dem Kaufdatum.

6.4 DayClocks gewährt keine Garantie, wenn eine unsachgemäße Verwendung vorliegt oder sich von außen herbeigeführte Katastrophen im weitesten Sinne des Wortes einstellen und wenn Verbraucherelektronik für professionelle Zwecke verwendet wurde und/oder Mängel durch die Zerlegung des Produkts entstanden sind.

6.5 Wenn sich während der Prüfung herausstellt, dass der Defekt durch die illegale oder fehlerhafte Installation von Software zurückzuführen ist, verfällt die Garantie.

6.6 Wenn sich während der Prüfung herausstellt, dass versucht wurde, das Produkte durch Dritte reparieren zu lassen, verfällt die Garantie. Das gilt jedoch nicht, wenn es sich um eine vorläufige und notwendige Maßnahme handelt, wobei die Notwendigkeit der getroffenen Maßnahme im Ermessen von DayClock liegt.

6.7 Wenn die Typ- oder Seriennummer des Produkts entfernt oder geändert wurde, verfällt jeglicher Anspruch auf Garantie.

7 Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet nicht für materielle oder menschliche Schäden, die auf die unsachgemäße Verwendung des Geräts oder die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften zurückzuführen sind. In diesen Fällen verfällt jeglicher Anspruch auf Garantie.

DayClocks International B.V.

Kanaalweg 33-35

2903 LR Capelle a/d IJssel

www.dayclocks.eu

info@dayclocks.eu



DayClocks